



MANUAL MEMORY LANE COMPANION APP

Dank voor uw download!

Installeren

INSTALLEER ALTIJD DE LAATSTE VERSIE VAN DE APP

Deze manual is ingesteld op de laatste beschikbare memory lane versie: **3.230 of hoger**

U kunt de memory lane app hier vinden:

 Android	 iOS (iPhone)	 PC
ai companion (nieuwste versie): AI Companion - Google play	ai companion (nieuw): AI Companion - App store	Er is ook een PC app: setup downloaden
Oude versie: Oude app - Google Play	Oude App - App store	

Machtigingen



Memory Lane heeft de volgende machtigingen nodig:

- Toegang tot uw fotoalbum
- Toegang tot de microfoon
- Toegang tot de camera
- Push Notificaties aan

Als een van deze machtigingen uitstaan kan de Memory Lane app niet goed functioneren


Wat nu?

Om optimaal gebruik te maken van uw Memory Lane moet u een aantal dingen doen.

- 1. Uw gegevens instellen**
- 2. Zorgscherm gebruiker instellen**
- 3. Anderen uitnodigen**
- 4. De dag nacht stand instellen**
- 5. Het foto album vullen**
- 6. Foto's toevoegen**
- 7. Praktisch Beeldbellen**
- 8. Ansichtkaarten**
- 9. Agenda**
- 10. Instellingen: Memory Lane voor iedereen geschikt maken!**

1. UW GEGEVENS INSTELLEN

Wilt u de voor- en achternaam van uw **account** aanpassen? Of wilt u uw geboorte datum of profiel foto toevoegen, of veranderen?

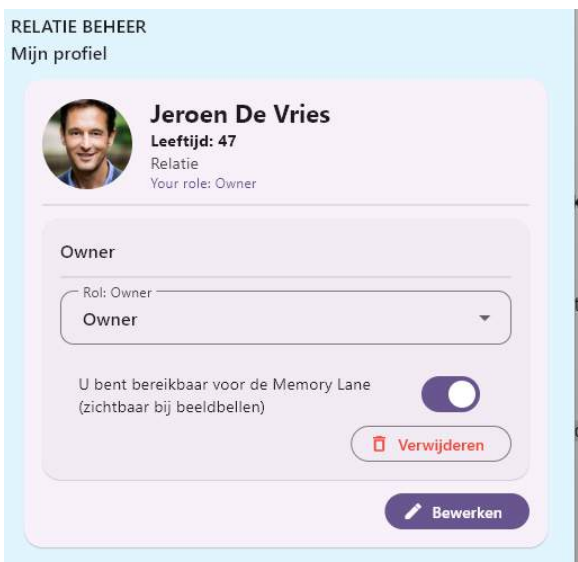	Open de memory lane app en log in
 RELATIE BEHEER	Kies in het hoofd menu RELATIE BEHEER :
	Kies uw eigen profiel (meestal het tweede profiel in de lijst) en druk op BEWERKEN

Mijn profiel bewerken Myself Gegevens Profiel foto First name Jeroen Last name De Vries Gender:[Male/Male] Male Date of Birth 1978-11-22 Save Details	Voer nu uw voor en achternaam in, en uw geboortedatum:
Mijn profiel bewerken Myself Gegevens Profiel foto  Upload New Picture	Upload een herkenbare profiel foto:

RELATIE BEHEER Mijn profiel  Jeroen De Vries Leeftijd: 47 Relatie Your role: Owner - Owner - Owner - Caretaker - Family - Friend - Visitor - Help And  Anna De vries	Uw rol aanpassen. LET OP: Als u uw rol aanpast kunt u niet meer terug. Alleen beheerders kunnen uw rol weer terugzetten.
U bent bereikbaar voor de Memory Lane (zichtbaar bij beeldbellen) 	U kunt uzelf ook onzichtbaar maken voor de Memory Lane gebruiker. U bent dan tijdelijk niet bereikbaar. Vergeet echter niet dit terug te zetten als u weer gebeld wilt worden.
	U kunt er ook voor kiezen om uzelf te verwijderen van deze Memory Lane. Kies nu de VERWIJDEREN knop. LET OP: Als u dit doet kunt u niet meer terug zonder opnieuw uitgenodigd te worden!

TIP: Voeg een goede profiel foto toe, deze wordt tijdens het beeldbellen getoond op de Memory Lane! (dit helpt bij het herkennen).

2. MEMORY LANE GEBRUIKER INSTELLEN


Wilt u de naam, profielfoto of geboortedatum van de zorg scherm gebruiker veranderen? Dat kan in de **Memory Lane APP** op deze plek:

	Open de memory lane app en log in
	Kies de RELATIE BEHEER button:
	Kies bij Memory Lane Gebruiker vervolgens de BEWERKEN button: <i>U moet nu de procedure doorlopen. U wordt gevraagd naar de voor- en achternaam, een foto en de geboorte datum, en uw relatie met deze persoon/personen.</i>

3. ANDEREN UITNODIGEN EN WHATSAPP

U kunt makkelijk met de memorylane app **familie en vrienden** toevoegen aan de Memory Lane, zodat zij ook foto's kunnen delen en kunnen beeldbellen met de Memory Lane.

Volg de volgende stappen:

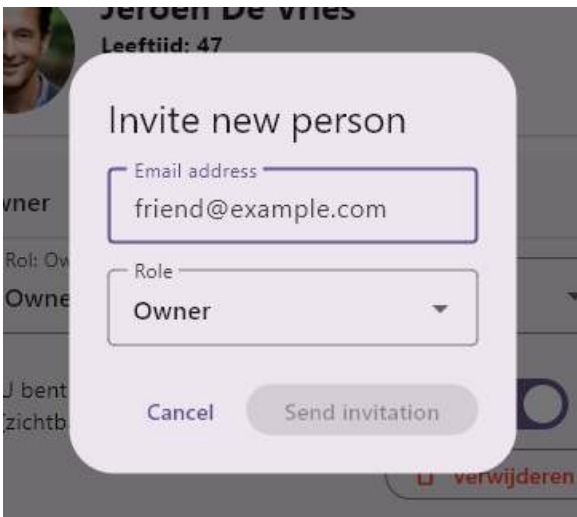	Open de memory lane app en log in
	Kies de RELATIE BEHEER button:
	Kies in het relatie beheer scherm voor Uitnodigen .
	U komt in het UITNODIGEN SCHERM en vul nu het email adres en de rol van de persoon die u wilt uitnodigen in! <i>Let op dat niet iedere rol de mogelijkheid heeft om mensen uit te nodigen.</i>

3.1. WhatsApp

U kunt een Whatsapp groep speciaal voor uw Memory Lane aanmaken waar foto's en filmpjes 14 dagen gedeeld kunnen worden die op de Memory Lane terecht komen.

U maakt als volgt een whatsapp groep aan:

Voorwaarden:

U moet Whatsapp geïnstalleerd hebben op dezelfde mobiel als waar de Memory Lane app op geïnstalleerd is.

Volg de volgende stappen:

1. Open **de memory lane app en log in**
2. Kies de **RELATIE BEHEER** button:



3. Kies nu **VERBINDEN MET WHATSAPP**

[tijdelijk niet aanwezig]

De whatsapp app zal opstarten met een bericht dat u moet versturen. Als dit bericht verstuurd is, krijgt u een link toegestuurd die u moet gebruiken om lid te worden van de whatsapp groep voor uw memory lane. U kunt nu berichten sturen.

U moet wel het whatsapp icoon aanzetten. Zie ook 10.3 WHATSAPP

4. DAG- EN NACHTSTAND INSTELLEN

De Memory Lane staat altijd aan. Daarom is het nodig om een nachtstand in te stellen. In de nachtstand wordt het scherm zwart, totdat iemand op het scherm drukt. U gaat dan naar het hoofdscherm. Is de nachtstand nog actief, dan keert de Memory Lane vanzelf weer terug naar de nachtstand.

Hoe laat dit elke dag gebeurt, wordt door de beheerder bepaald. Hier is hoe u dat kunt doen:

	Open de memory lane app en log in
	Kies de INSTELLINGEN button:
	Selecteer de Memory Lane aan de hand van het serienummer, en het tabblad Algemeen :
	Scroll naar de Slaapstand gegevens en vul de gegevens goed in. De gegevens worden meteen opgeslagen en doorgestuurd naar de Memory Lane!

5. HET FOTOALBUM VULLEN

Een goed fotoalbum is essentieel voor het goed functioneren van Memory Lane. Daarom is het zeer belangrijk om goede foto's toe te voegen. Waarom is dit zo belangrijk?

- Goede foto's zorgen ervoor dat de aandacht op de Memory Lane gericht is. Hierdoor wordt op een natuurlijke manier aandacht besteed aan agenda punten.
- Goede foto's helpen de Memory Lane gebruiker om langer herinneringen vast te houden. Kies daarom zorgvuldig voor herinneringen.


Vul het fotoalbum met waardevolle herinneringen voor de Memory Lane gebruiker. Het doel is om een 'levensboek' te maken. Deze herinneringen dragen bij aan het behoud van dit soort momenten. Mocht de Memory Lane gebruiker opgenomen worden, dan functioneert dit levensboek ook om de verpleging te helpen om verbinding te krijgen met de Memory Lane gebruiker.

5.1. TIPS:

- Kies belangrijke levensmomenten voor uw foto's:
 - ★ Waar heeft de Memory Lane gebruiker gewoond?
 - ★ Met wie op school geweest?
 - ★ Waar gewerkt?
 - ★ Kinderen?
 - ★ Huwelijk?
 - ★ Vakanties?
- Voeg anderen toe aan de Memory Lane en vraag ze om foto's te delen.
- **Kies kwaliteit boven kwantiteit!**
Upload niet al uw vakantie foto's, maar kies voor foto's die iets voor de Memory Lane gebruiker betekenen.

6. FOTO's TOEVOEGEN

Hier leggen we uit hoe foto's toe te voegen.

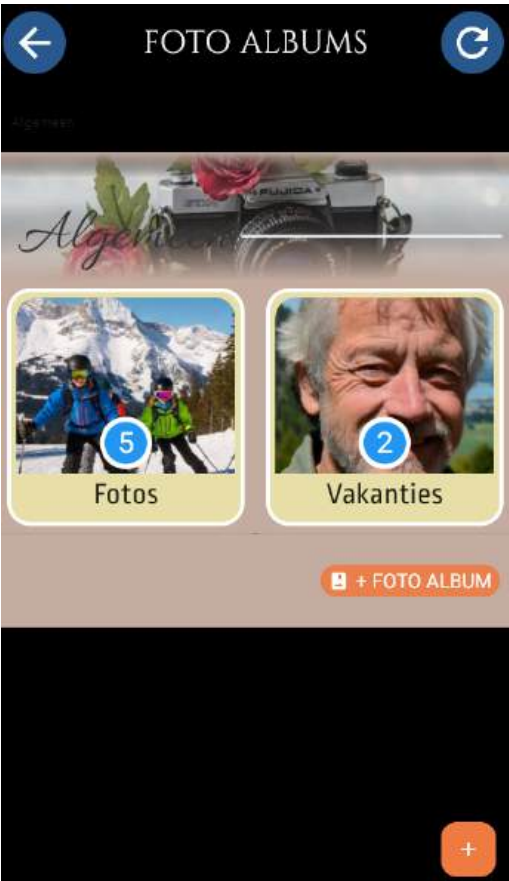
	Open de memory lane app en log in
	Kies de FOTOS button:
	Kies scroll door de lijst met albums gegroepeerd op thema en kies een fotoalbum uit de lijst, of maak een nieuw thema met  (zie ook 6.1): Kies of maak een nieuw fotoalbum met  (zie ook 6.2):



Nu kunt u in het album dat u gekozen heeft foto's toevoegen:



Kies de  om foto's te selecteren en toe te voegen!

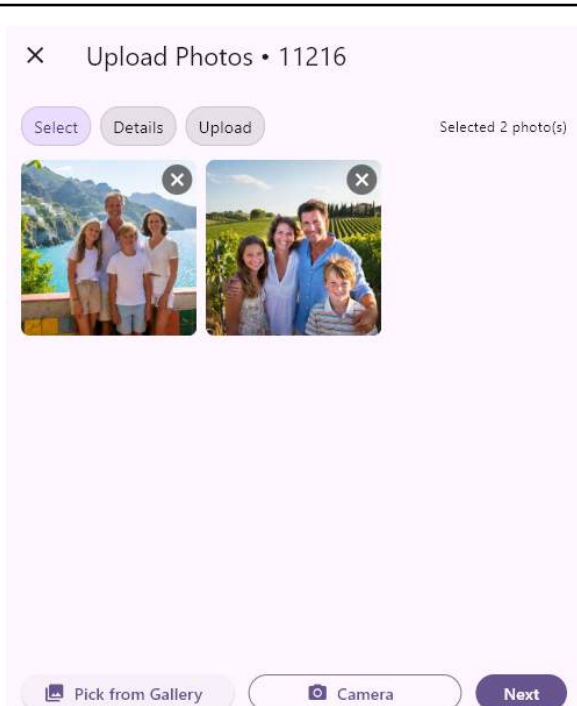

Kies **pick from gallery** om foto's te selecteren om toe te voegen, en dan **Next**

✕ Upload Photos • 11216 Select Details Upload Add a title & description (optional), then Save Title (applies to all) Description (applies to all)  Cancel Save & Upload	Voor een titel en beschrijving in, dit helpt de Memory Lane gebruiker met herinneringen. Kies nu Save & Upload
--	---


Thema's zijn onderwerpen die helpen om fotoalbums te groeperen, hierdoor kunnen anderen makkelijk foto's toevoegen aan de juiste albums.

U kunt maximaal 5 foto's per keer toevoegen!

6.1. Nieuw thema aanmaken

Thema's zijn onderwerpen om fotoalbums te groeperen en makkelijk vindbaar te maken voor anderen. Hier leggen we uit hoe een thema makkelijk aan te maken.

Hier leggen we uit hoe een thema toe te voegen.

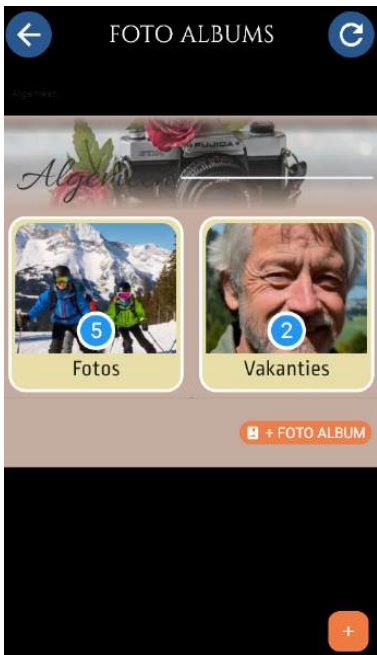	Open de memory lane app en log in
	Kies de FOTOS button:
	Kies  om een nieuw thema te creëren!



U kunt nu de gegevens van het thema invullen, kies een Icon/stijl dat u bevalt:




Kies **opslaan** als u het thema wilt creëren. U keert nu terug in het vorige scherm:

7. PRAKTISCH BEELDBELLEN

Beeldbellen is een heel belangrijk onderdeel van Memory Lane:

	Open de memory lane app en log in
	Kies de BEELDBELLEN button in het hoofdmenu
	U komt nu in het beeldbel menu terecht, kies de Memory Lane van de gebruiker die u wilt bellen, in dit geval HAQYS1F2

	De Memory Lane wordt nu gebeld. Wacht tot er wordt opgenomen
---	---

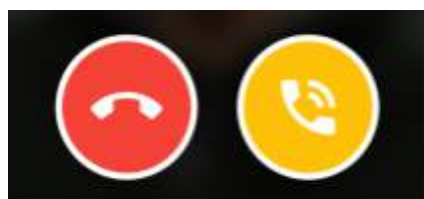

Tip: **Beheerders** kunnen voor de Memory Lane gebruiker opnemen. Wacht een paar secondes en dan verschijnt de gele **DIRECT OPNEMEN** knop.



7.1. Instellingen tijdens beeldbellen


Tijdens het bellen krijgt u een aantal knoppen te zien:

	Hiermee kunt u uw eigen microfoon en luidspreker volume instellen.
	Alleen te zien als u uw telefoon horizontaal of landscape houdt - Hiermee kunt u de microfoon en luidspreker van de Memory Lane gebruiker instellen. U krijgt dan dit te zien om het in te stellen, kies de instelling die u wilt en kies Send om het door te sturen naar de Memory Lane gebruiker: 

8. ANSICHTKAARTEN

Stuur af en toe een digitale Ansichtkaart! (Vergeet niet om een reactie mogelijkheid in te stellen).

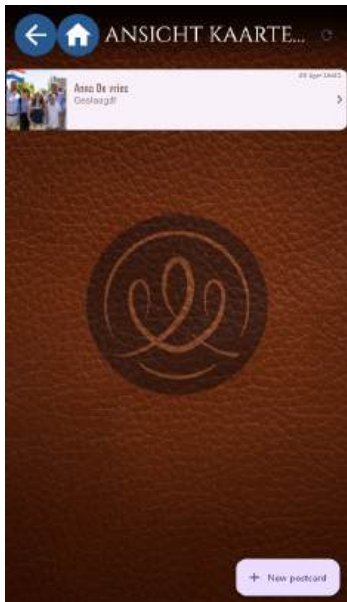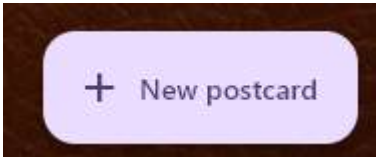
	Open de memory lane app en log in
	Kies Ansichtkaarten
	Kies new postcard 

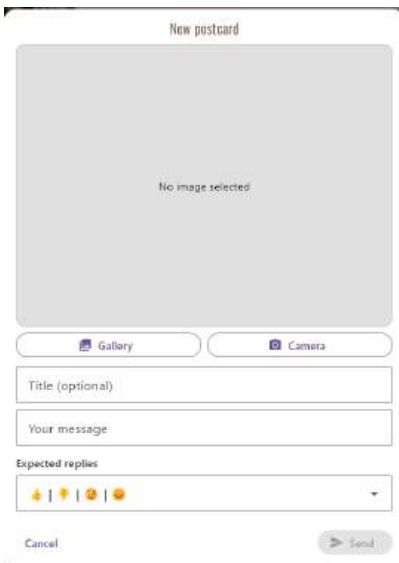
	Kies een foto met gallery of maak een foto met Camera Vul een bericht in bij Your message, kies één van de reactie mogelijkheden en druk op Send
---	---

Reactie Keuzes geven de Memory Lane gebruiker opties om te reageren op uw ansichtkaart!

9. AGENDA

In de agenda kunt u makkelijk activiteiten en reminders toevoegen.

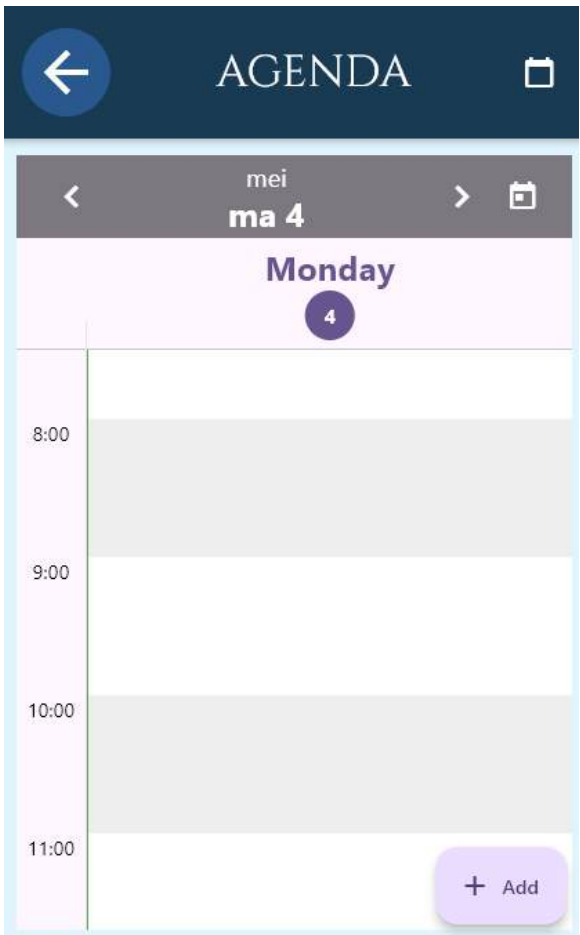	Open de memory lane app en log in
	Kies de AGENDA button:
	Dubbel tap op het uur, of de afspraak om die aan te maken of te veranderen.

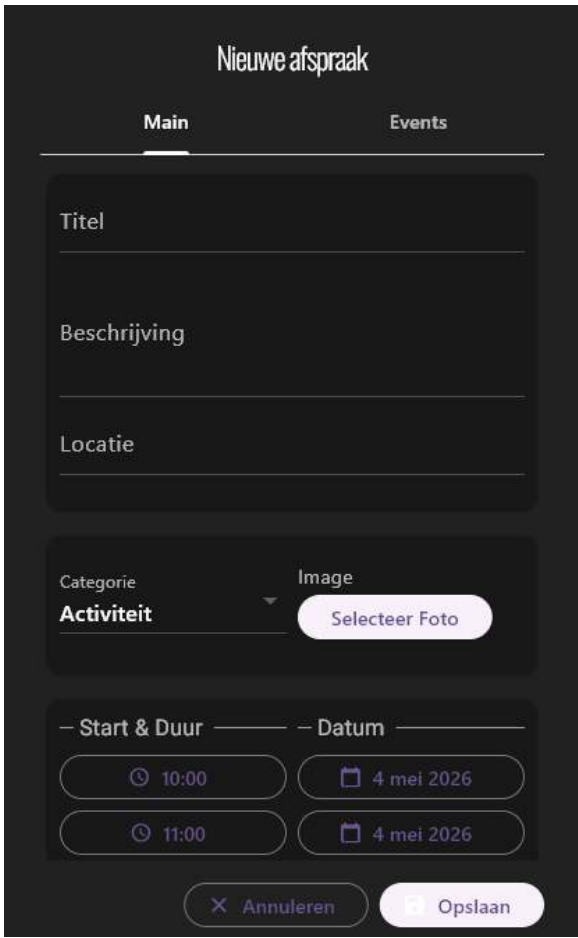	
	Nieuwe afspraak aanmaken, geef een goede beschrijving en titel.
	Kies een categorie die van toepassing is voor deze afspraak en (optioneel) voeg een foto toe.

TIP! gebruik de foto upload functie om activiteiten duidelijker te maken.

Dit helpt enorm bij het nakomen van deze agenda punten.

Voorbeeld: Vuilnis buiten zetten? Maak een foto van de vuilnisbak waar duidelijk de locatie uit naar voren komt, soms is men vergeten waar de vuilnisbak stond.

10. INSTELLINGEN

U kunt de Memory Lane volledig instellen op afstand met de app.

Waar?

	Open de memory lane app en log in
	Kies de INSTELLINGEN button:

TIP: Om de nieuwe instellingen te kunnen gebruiken dient u wel de Memory Lane opnieuw op te starten.

10.1. Voorbeelden van instellingen

Om Memory Lane zo nuttig mogelijk in te kunnen stellen raden we u aan om te kijken wat wenselijk is voor de gebruiker en nuttig voor u als Mantelzorger. We nemen een tweetal scenario's door.

10.1.1. Minimaal - zo min mogelijk impulsen

Dit scenario gaat ervan uit dat u rust wil voor de gebruiker en zo min mogelijk impulsen die verwarring kunnen geven wilt genereren.

Wat en hoe?

In dit scenario kan de gebruiker de screensaver niet verlaten.

U kunt normaal beeldbellen en agenda afspraken in plannen die in beeld komen.

Hier ziet u een voorbeeld waarbij alleen de klok pagina aanstaat en de beheerder bel buttons in kaart modus staan:



Hoe te bereiken?

- Kies **minimaal** in **snelle instellingen** (Tabblad Algemeen, sectie Snelle instellingen onderin).



- Zet **beelbel speaker volume** en **microfoon volume** in **tabblad Algemeen** op resp. maximaal en 75%.
- Zet **beheerder bel button** aan in **tabblad Screensaver**
- Zet **bel button kaart** aan in **tabblad Screensaver**
- Zet **DATUM WEERGAVE** aan in **tabblad Screensaver**
- Zet **KLOK** op **GROOTST** in **tabblad Screensaver**

10.1.1. Algemeen- vermaak, beeldbellen en foto's

In dit scenario kan de gebruiker de screensaver verlaten om te beeldbellen met iedereen (niet alleen beheerders), foto's te bekijken en een beperkte vermaak te kunnen gebruiken.

Screensaver:



Hoofdmenu:




Hoe te bereiken?

- Kies **Aangeraden** in **snelle instellingen** (Tabblad Algemeen, sectie Snelle instellingen onderin).



- Zet **beelbel speaker volume** en **microfoon volume** in **tabblad Algemeen** op resp. **maximaal** en **75%**.
- Zet **beheerder bel button** aan in **tabblad Screensaver**
- Zet **Vorige/Volgende button** aan in **tabblad Screensaver**
- Zet **Agenda,Ansichtkaarten, Instellingen, UIT** in **tabblad Overig**, **tabblad Menu's**
- Zet **Apple/Spotify** en **Mijn filmpjes UIT** in **tabblad Overig**, **tabblad Menu's**
- Zet **DATUM WEERGAVE** aan in **tabblad Screensaver**
- Zet **KLOK** op **MIDDEL** in **tabblad Screensaver**

10.2. ALGEMEEN TABBLAD

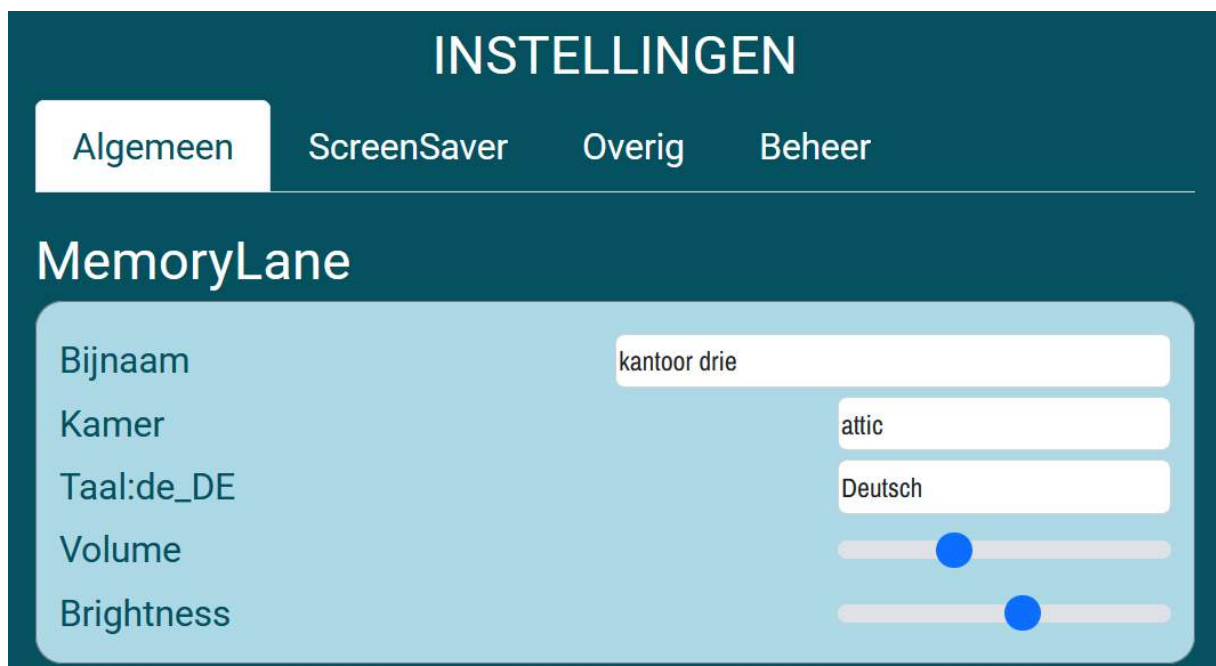

INSTELLINGEN

Algemeen ScreenSaver Overig Beheer

MemoryLane

Bijnaam:

Kamer:

Taal: de_DE:

Volume:

Brightness:

Memory Lane

BIJNAAM	Hier kunt u uw Memory Lane een bijnaam geven, die wordt gebruikt om uw Memory Lane makkelijk te kunnen herkennen als u meer dan 1 Memory Lane gebruikt.
KAMER	locatie van de Memory Lane. Wordt gebruikt bij bewegings data als er meer dan 1 Memory Lane gebruikt wordt.
TAAL	de taal instelling van de Memory Lane.
VOLUME	Standaard volume van de Memory Lane
BRIGHTNESS	Helderheid instelling scherm van de Memory Lane

Slaapstand

De Memory Lane kan niet uitgezet worden, maar heeft een slaap stand om net te doen alsof de Memory Lane uitstaat. U kunt dan nog steeds contact hebben met de Memory Lane.

Slaap stand

Slaap stand bepaalt wanneer de SLAAP STAND van Memory Lane begint en eindigt. In de SLAAP STAND is het scherm zwart.

Slaap stand eindigt

07:00

Slaap stand begint

24:00

Beeldbel instellingen

Beeldbel Instellingen

Beeldbel microfoon volume



Beeldbel speaker volume



Forceer inzoomen



Zoom in/uit knop



MICROFOON VOLUME	Stelt het standaard volume van de microfoon in. TIPS: - <i>Standaard op drie kwart instellen!</i> - <i>Maximaal volume kan tot vervorming leiden!</i>
SPEAKER VOLUME	Het volume van de Memory Lane tijdens het beeldbellen.
FORCEER INZOOMEN	Hiermee kunt u forceren dat het beeld ingezoomd is, dit is handig als u altijd met een mobiel belt in portrait

ZOOM IN/UIT KNOP	Of er tijdens het beeldbellen een in/uit zoomknop is, zodat de Memory Lane gebruiker die zelf kan instellen. Meeste mantelzorgers zetten die uit.
-------------------------	---

Snelle Instellingen

Om het snel in te stellen van Memory Lane hebben we een aantal snelle instellingen.

Snelle Instellingen

Minimaal

Aangeraden

Maximaal

MINIMAAL	Hiermee zet u alles uit. Aangeraden als de Memory Lane gebruiker zelf niet in staat is menu's etc te bedienen. De Memory Lane gebruiker kan dan in principe de screensaver niet verlaten. Zet daarna alles wat u denkt nodig te hebben aan.
AANGERADEN	Een mix van de meeste mogelijkheden.
MAXIMAAL	Alle opties aan.

10.3 SCREENSAVER TABBLAD

Hier stelt u alles in dat met de SCREENSAVER te maken heeft.

Algemeen

ScreenSaver

Overig

Beheer

Algemeen

Screensaver verlaten

☒

Vorige/Volgende buttons

☒

Beheerder bel button

☐

Bel button kaart

☐

Foto's per sessie

20

Secondes tussen foto's

10

Tijd tot screensaver start

5

Pagina wissel

fade

Voorkeur voor gelikedede fotos

more

Voorkeur voor fotos jonger dan

2 days

Algemeen

SCREENSAVER VERLATEN	Bepaalt of de gebruiker de screensaver mag verlaten
VORIGE/VOLGENDE BUTTONS	Bepaalt of de gebruiker kan navigeren naar de volgende of vorige pagina.

BEHEERDER BELBUTTON	Zet een knop aan op de screensaver pagina waarmee de beheerders direct gebeld kunnen worden.
BEL BUTTON KAART	Hoe de beheerder bel button eruit ziet. (Aanzetten maximaliseert de foto van de beheerder).
FOTO'S PER SESSIE	Het aantal foto's dat opgehaald wordt. Houdt dit op 20
SECONDES TUSSEN FOTOS	Bepaalt hoe lang foto's in beeld blijven
TIJD TOT SCREENSAVER START	Aantal seconden dat het duurt tot de screensaver start vanuit het hoofd menu
PAGINA WISSEL	Manier van wisselen tussen pagina's
VOORKEUR GELIKEDE FOTOS	Als u foto's liken/dislliken aan heeft staan worden hiermee foto's voorgetrokken die meer likes hebben
VOORKEUR FOTOS JONGER DAN	Hiermee kunt u bepalen of nieuwe foto's een voorkeur krijgen of niet en hoelang nieuw duurt.

FOTO

Hier stelt u in wat er gebeurt als er een foto getoond wordt.

Foto

Titel	☒
Titel linkt naar album	☒
Beschrijving	☐
Animatie beschrijving	☐
Likes	☐
Dislikes	☐
Pexel foto's	☒
Minimum Pexel foto's	5
- Thema	forest

TITEL	Of de titel van een foto getoond moet worden.
TITEL LINKS NAAR ALBUM	Bepaalt of de titel door linkt naar het foto album. Uitzetten als u niet wilt dat de gebruiker uit de screensaver mag komen.
BESCHRIJVING	Of de beschrijving bij de foto getoond moet worden
ANIMATIE BESCHRIJVING	Of de beschrijving tekst animeert. Dit kan hinderlijk zijn omdat het 'beweegt'
LIKES	Of de gebruiker een thumbsup symbool ziet waarmee hij/zij de foto een voorkeur kan geven.
DISLIKES	1 dislike is voldoende om een foto niet meer te tonen.

PEXEL Foto's

Pexel is een foto bibliotheek waar amateur/professionele fotografen foto's delen. U kunt uit deze bibliotheek foto's laten kiezen met een specifiek thema.

Dit is leuk als de gebruiker een bepaald thema als hobby of interesse heeft. Deze worden dan tussen uw foto's toegevoegd.

De volgende thema's zijn mogelijk:

'nature' , 'mountains' , 'forest' , 'water' , 'landscapes' , 'cats' , 'dogs' ,
'birds' , 'wildlife' , 'animals' , 'cars' , 'trains' , 'planes' , 'travel' ,
'beach' , 'house' , 'castles' , "christmas" , "france" , "italy" , "spain" ,
"germany" , "england" , "morocco" , "japan" , "russia" , "china" , "amsterdam"
, "rotterdam" , "new york" , "paris" , "rome" , "london" , "tokyo" , "vienna"

Ook kunt u een AUTO thema kiezen, dit betekent dat er automatisch een thema gekozen wordt dat bij het jaargetijde past en/of feestdagen!

PAGINA'S

Om de gebruiker meer context van zijn of haar omgeving te geven is het mogelijk om informatie pagina's toe te voegen.

Pagina's

Kies de pagina's die u wilt tonen in de screen saver.

Nieuws pagina	☐
Weer vandaag	☒
Buien radar	☐
Agenda pagina	☒
Klok pagina	☒

NIEUWS PAGINA

De nieuws pagina toont het laatste nieuws artikel dat aan de Memory Lane krant is toegevoegd.

WEER VANDAAG	De weer pagina toont de het weer op locatie van de Memory Lane.
BUIEN RADAR	Toont de lokale buienradar
AGENDA PAGINA	Toont een pagina met de afspraken van vandaag
KLOK PAGINA	Toont een pagina met een hele grote KLOK

INFO EN KLOK

Met deze instellingen bepaalt u of er altijd een KLOK in beeld is of niet en of de DATUM getoond wordt.

Info

Datum weergave ☒

Berichten weergave ☒

Klok

Klok ☒

Type

Grootte


Uur alarm

DATUM WEERGAVE	Datum aan of uit
BERICHTEN WEERGAVE	Zet berichten aan of uit: - Gemiste gesprekken - Nieuwe foto's - Nieuwe Ansichtkaarten - Nieuwe filmpjes in mijn filmpjes

KLOK	Of er altijd een klok in beeld is. (Rechtsboven)
TYPE	Er zijn 6 type analoge klokken
GROOTTE	Hoe groot de klok is. TIPS <i>We raden middel of groter aan omdat dit ook de grootte van beheerder beeldbel button bepaalt en berichten.</i>
UUR ALARM	Of er op het hele uur een signaal gegeven wordt en wat voor signaal dat dan is.

10.4 OVERIG TABBLAD

10.4.1 MENU'S - OVERIG

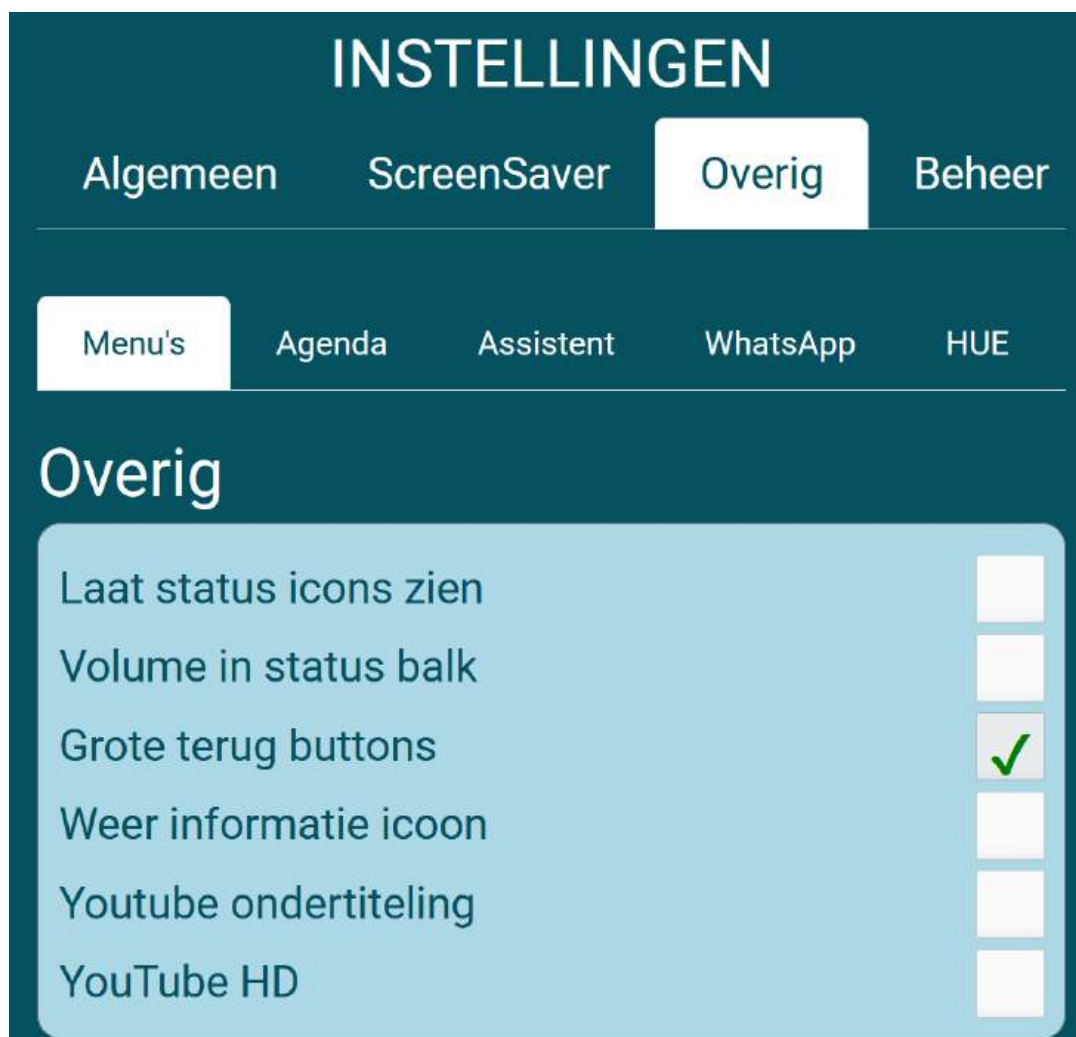

STATUS ICONS	Altijd uitlaten
VOLUME IN STATUS BALK	Toont een klein volume icoon rechtsboven in. Is te klein voor de meeste gebruikers.
GROTE TERUG BUTTONS	Bepaalt de grootte van de terug buttons TIP: aanlaten
WEER INFORMATIE ICOON	Of er een weer icon in altijd in beeld is
YOUTUBE ONDERTITELING	Ondertiteling (waar available) van de youtube filmpjes
YOUTUBE HD	Of er standaard voor HD gekozen moet worden bij Youtube (indien beschikbaar)

10.4.2 MENU'S - HOOFD MENU KNOPPEN

Zet knoppen in het hoofdmenu van de Memory lane aan of uit.

Hoofd Menu Knoppen

Agenda

Foto's

Ansichtkaarten

Vermaak

Beeldbellen

Instellingen

☐
☐
☐
☒
☒
☒

AGENDA	Zet toegang tot de AGENDA aan of uit
FOTO'S	Zet toegang tot de fotoalbums aan of uit

ANSICHTKAARTEN	Zet toegang tot de ansichtkaarten aan of uit
VERMAAK	Zet toegang tot de vermaak pagina aan of uit.
BEELDBELLEN	Zet toegang tot de beeldbel pagina aan of uit
INSTELLINGEN	Zet toegang tot de instellingenpagina aan of uit. TIP: Deze knop wordt meestal uitgezet!

	Voorbeeld van het hoofdmenu scherm waar instellingen en ansichtkaarten uitgezet is.
---	---

10.4.3. MENU'S - VERMAAK MENU BUTTONS

In het vermaak menu kunt u bepalen welke onderdelen toegankelijk zijn of niet.

Vermaak Menu Buttons	
Radio en Podcasts	☒
Apple Music en Spotify	☒
Krant	☒
Spelletjes	☒
Filmpjes	☒
Mijn filmpjes	☒

RADIO	Zet toegang tot de verschillende radiozenders aan of uit
--------------	--

PODCASTS	Zet toegang tot de verschillende podcasts aan of uit
MUZIEK	Zet toegang tot Apple Music/Spotify aan of uit Helaas is deze pagina tijdelijk niet meer toegankelijk
KRANT	Zet toegang tot de MEMORY LANE krant aan of uit
SPELLETJES	Zet toegang tot de SPELLETJES pagina aan of uit
FILMPJES	Zet toegang tot de FILMPJES pagina aan of uit
MIJN FILMPJES	Zet toegang tot de MIJN FILMPJES pagina aan of uit.

10.4.4 MENU'S - SPELLEN MENU KNOPPEN

Hiermee bepaalt u de toegang tot de verschillende spellen die Memory Lane biedt.

Spellen Menu Knoppen

Memory spel	☒
2048 spel	☒
Sudoku	☒
Schaken	☒
Woordzoeken	☒
Patience	☒

10.5 AGENDA

Algemeen
ScreenSaver
Overig
Beheer

Menu's
Agenda
Assistent
WhatsApp
HUE

Agenda

Agenda post-its
Agenda gebruikt spraak
Agenda gebruikt geluid
Agenda geluid
Dag/Week opties
Week ipv Dag
Gebruik klok ipv plaatje
Beheerder bel button

☒
☒
☒

none

☒
☐
☐
☒

POST-ITS	Of er post-its in het scherm verschijnen bij feestdagen, verjaardagen en ALL DAY events (afspraken die langer dan 6 uur duren)
GEBRUIKT SPRAAK	Of de afspraken uitgesproken mogen worden
GEBRUIKT GELUID	Of er een geluid afgespeeld wordt als de afspraak actief wordt

GELUID	Welk geluid er dan afgespeeld wordt
DAG/WEEK opties	Of de agenda per dag afspraken toont of op weekbasis
GEBRUIK KLOK IPV PLAATJE	Als dit aan staat wordt er bij afspraken die actief zijn een grote klok getoond ipv het plaatje
BEHEERDER BEL BUTTON	Als dit aan staat wordt er op de afspraak pagina de beheerder bel button getoond

10.6. ASSISTENT - SPRAAK & GELUID

Algemeen

ScreenSaver

Overig

Beheer

Menu's

Agenda

Assistent

WhatsApp

HUE

Spraak & Geluid

Assistent

☒

Spraak

☒

Stem

Popup verdwijnt automatisch

☒

Popup extra secondes

AI Model

Spraak Model

Agenda afspraken maken

☒

ASSISTENT	Of onze AI assistent aan of uit staat. NB: Geldt alleen als u een AI abonnement heeft. Voorlopig is deze grati
SPRAAK	Of spraak gebruikt mag worden
STEM	Welke stem gebruikt wordt
POPUUP VERDWIJNT AUTOMATISCH	Of de AI popup automatisch verdwijnt
POPUUP EXTRA SECONDES	Hoe lang de AI popup in beeld blijft

AI MODEL	Welk AI model gebruikt wordt. OpenAI is tijdelijk niet beschikbaar
SPRAAK MODEL	Welk text to speech model gebruikt wordt. Gemini verplicht.
AGENDA AFSPRAKEN MAKEN	Of de assistent afspraken mag toevoegen aan de agenda.

10.6.1. ASSISTENT - BEGROETINGEN

Als de memory lane gebruiker in de ochtend voor de Memory Lane langs loopt kunt u een begroeting laten uitspreken. Dit is handig om mensen actief te herinneren aan de agenda, feestdagen etc. Tevens kan het gevoelens van eenzaamheid verminderen.

Voor de ochtend, middag en avond gelden de volgende instellingen:

Ochtend Begroeting

Ochtend begroeting	☒
Met agenda	☐
Met feestdagen	☐
Met gedragsanalyse	☒
Met nieuws	☒
Met weer	☐
Met leuke feitjes	☐
Met inspirationele quote	☐

OCHTEND/MIDDAG/AVOND BEGROETING	Zet de desbetreffende begroeting voor dat dagdeel aan of uit
MET AGENDA	Neem afspraken voor de dag mee in de begroeting

MET FEESTDAGEN	Neem feestdagen ed. mee in de begroeting (dit helpt om mensen meer context te geven)
MET GEDRAGSANALYSE	Neemt zaken mee als vroeg/laat opstaan
MET NIEUWS	Of het laatste nieuws besproken mag worden
MET WEER	Of het weer besproken mag worden
MET LEUKE FEITJES	Of er leuke feitjes op die datum meegenomen mogen worden
MET INSPIRATIONELE QUOTE	Of er een interessante/inspirationale quote meegenomen mag worden

10.7. WHATSAPP

U kunt Memory Lane verbinden met een speciale whatsapp groep. Elke Memory Lane heeft zijn eigen whatsappgroep. Deze worden speciaal gecreëerd voor uw Memory Lane, elk bericht wordt doorgegeven. Uitzonderingen zijn antwoorden op berichten.

INSTELLINGEN

[Algemeen](#)[ScreenSaver](#)[Overig](#)[Beheer](#)[Menu's](#)[Agenda](#)[Assistent](#)[WhatsApp](#)[HUE](#)

WhatsApp

whatsApp



whatsApp icon



Spreek nieuwe berichten uit



Antwoord button



whatsApp in berichten



Verbeter antwoorden met AI



11. GELUID voor slechthorenden

Soms is het geluid van de memorylane **niet toereikend**, Het is daarom mogelijk om een externe **bluetooth speaker** aan te sluiten op MemoryLane. Let hierbij op dat sommige bluetooth speakers in 'slaap' vallen om stroom te besparen.

We hopen u hiermee een beter beeld van de vele mogelijkheden van Memory Lane te geven. Heeft u vragen of suggesties? Mail ons gerust op: info@roxelane.nl

DE MEMORY LANE ZELF

Hieronder volgt een nog niet volledig overzicht van de schermen van de Memory Lane.

1. SCREENSAVER

De Memory Lane gaat uiteindelijk altijd over op de screensaver. Hier ziet u de screensaver met de weerpagina actief (deze kan uitgezet worden) en een maximale configuratie, met een vooraankondiging van een afspraak die over twee uur plaats gaat vinden.

Maximaal screensaver scherm



Minimaal screensaver scherm met beheerder bel mogelijkheid




Type pagina's

De volgende type pagina's kunnen worden geactiveerd:

	Klok pagina Voor het besef van tijd.
	Buienradar pagina Als men naar buiten kan/mag, is dit handig om te zien wanneer.

	Weer pagina Pagina die een voorspelling van de dag geeft. Handig als men wandelen wil stimuleren.
	Nieuws pagina Pagina in de screensaver met het laatste nieuws van de Memory Lane krant.

Funcities

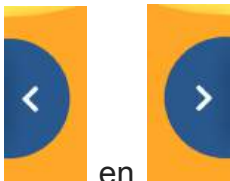	Ga naar de volgende of vorige pagina binnen de screensaver! Ze worden alleen getoond na beweging voor het scherm.
	KLOK: Dubbel tap op de klok: spreekt tijd uit.
	Datum: Dubbel tap spreekt de datum uit.
	Verlaten screensaver Wanneer toegestaan, kan de gebruiker de screensaver verlaten naar het hoofdmenu.

 en 	AI ASSISTENT: Hiermee kunt u de Assistent activeren om een gesprek te beginnen of een instructie te geven. Wordt alleen getoond als er beweging is geweest.
	Whats App verbinding Hiermee kunt u direct naar het WhatsApp berichten centrum springen. Wordt alleen getoond als er beweging is geweest.

2. HOOFDMENU



 BEELDBELLEN	Beeldbellen Hier kunt u naar het beeld bellen scherm gaan. Daat kunt u eenvoudig beeldbellen.
 VERMAAK	Vermaak Gaat naar een pagina met verschillende vormen van vermaak. Waaronder: - Krant - Podcasts - Radio zenders - Filmpjes (Youtube selectie) - Spelletjes - Muziek

 INSTELLINGEN	Instellingen Indien toegestaan. Hier kunt u de meeste instellingen die op de companion app ingesteld kunnen worden ook instellen. Daarnaast geeft dit scherm toegang tot een aantal functies die van belang zijn en niet via de companion app geregeld kunnen worden: - wifi instellingen - bluetooth
 ANSICHTKAARTEN	Ansichtkaarten Gaat naar een scherm met alle ansichtkaarten. Ze kunnen hier gelezen worden en beantwoord. Eventuele reacties kunnen worden ingesproken
 FOTO'S	Foto's Gaat naar het scherm met de fotoalbums. Hier kan de gebruiker alle foto's bekijken. Foto's in de screensaver hebben de mogelijkheid om te linken naar de fotoalbum pagina.
 AGENDA	Agenda Gaat naar de pagina met de 2 weeks agenda van de gebruiker. Hier kan de gebruiker eventuele nieuwe afspraken toevoegen (indien toegestaan) en afspraken in de context van de dag/week zien
	WhatsApp Gaat naar de WhatsApp pagina. Hier kunt u berichten en filmpjes en plaatjes zien die in de speciale whatsapp groep van uw Memory Lane gedeeld zijn.



AI Assistentie

Hiermee kunt u gaan praten met onze AI Assistent. Probeer het uit en spreek iets in.

Hoofd menu knoppen beheren


Zoals bekend kunt u in 10.3.2. Alle knoppen aan/uit zetten. Als u bijvoorbeeld **ansichtkaarten** en **instellingen** uit zet, ziet het scherm er als volgt uit:



3. BEELDBELLEN



Hier kunt u de contacten bekijken waar u mee kunt beeldbellen. Let wel, dat als u meer dan 1 Memory Lane heeft, deze Memory Lane ook in het menu verschijnt omdat u ook van Memory Lane naar Memory Lane kunt bellen.

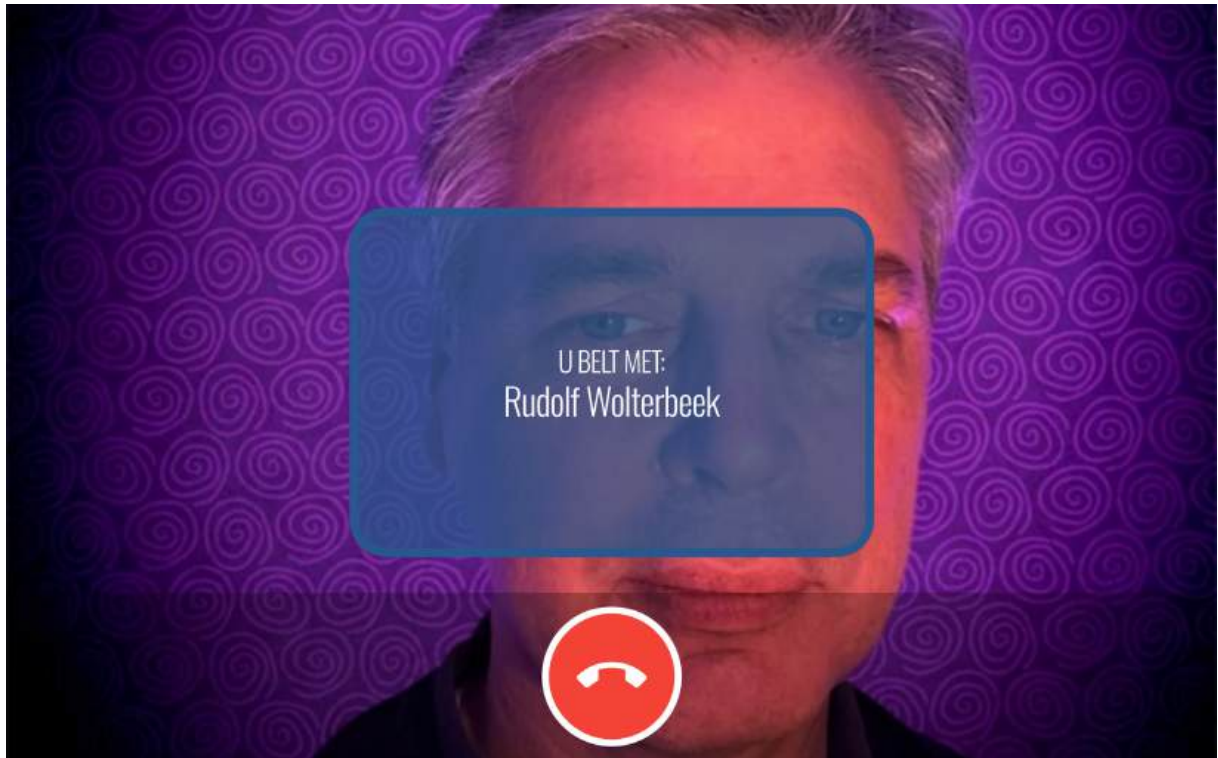

 Rudolf Wolterbeek



4. ANSICHTKAARTEN



Hier kunt u alle ansichtkaarten zien.

	Verversen – Haalt nieuwe ansichtkaarten op
	Verwijderen – delete de huidige ansichtkaart!
	Spring naar de nieuwste ansichtkaart.

	Vorige/Volgende – ga naar de volgende of vorige ansichtkaart.
---	--

ACHTERKANT – ANSICHTKAART LEZEN EN REAGEREN

Als u ergens op de ansichtkaart tapt dan draait de ansichtkaart om. U kunt dan lezen wat men geschreven heeft. En u kunt reageren op de ansichtkaart door een bericht in te spreken!



	Spreek een reactie in:
	Automatische reacties: Het is ook mogelijk een voorgedefinieerde EMOTICON reactie te laten geven.

5. VERMAAK

Hier kunt u alle vormen van vermaak die de Memory Lane biedt gebruiken. Kies 1 van de verschillende vormen. Uiteraard zijn alle knoppen aan of uit te zetten!



5.1. VERMAAK - SPELEN


Op de spellenpagina vindt u alle spellen die Memory Lane biedt.



5.1.1. SOLITAIRE:



5.1.2. SCHAKEN:

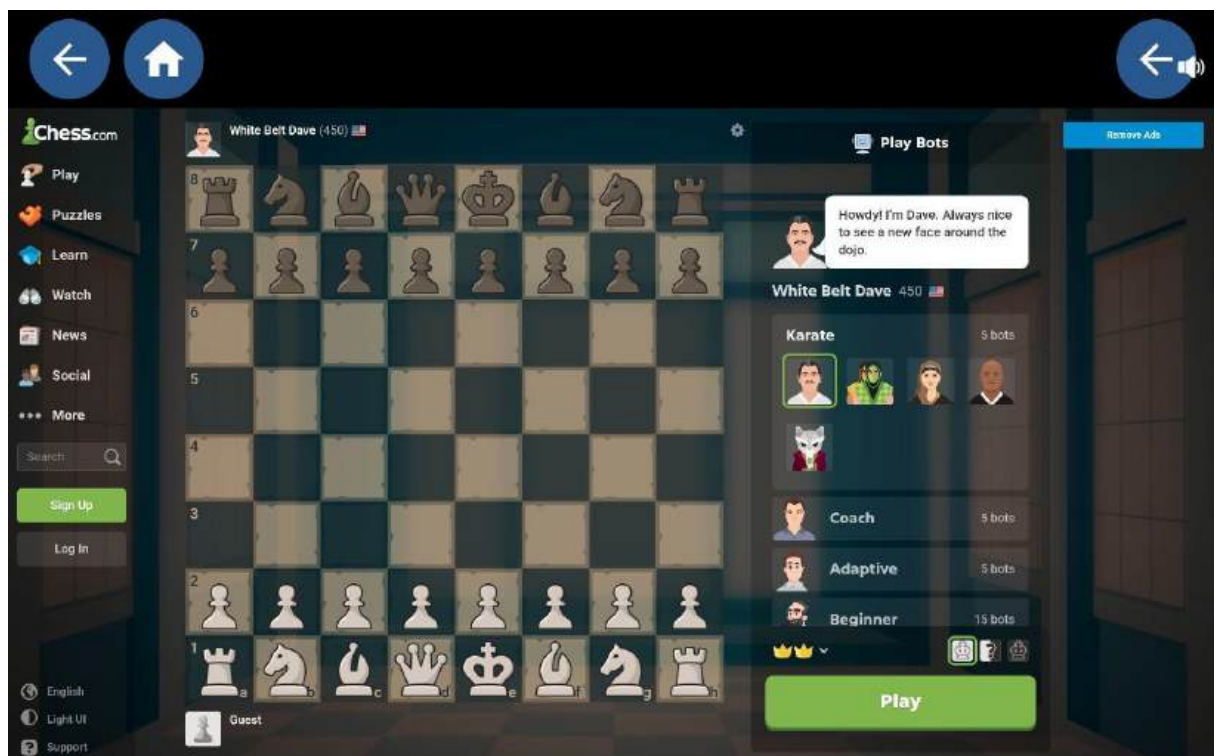

5.1.3. SUDOKU:



The screenshot shows a mobile application interface for a Sudoku game. At the top, there is a navigation bar with icons for back, home, a red die, the game title "SUDOKU SPEL" over a blue card, and a speaker icon. Below the navigation bar, the game status is displayed: "BEURT:0", "FOUTEN:0", and "SCORE:0". The main area features a 9x9 Sudoku grid. The grid contains the following numbers:

4	3	1	2	6			7	8
9	8	6	5	4	7	2		1
5	2	7	1	8		4	6	9
1	6	8	7	5	4	3	9	2
2	4	5	3	9		1		7
3		9	8	2	1		4	
		2	4	7	8	9	1	3
7	1	4		3	2	8		
	9	3			5		2	4

To the right of the grid is a large dark blue area with a "NIEUW SPEL" button. On the left side, there are icons for "PHILIPS hue" and a WhatsApp logo. In the bottom right corner, there is a temperature display showing "30.6°" with a red circle below it.

5.2. KRANT


De Memory Lane Krant wordt elk uur up to date gehouden! Tap op de



Tap op een artikel om het te laten uitspreken

Nieuw Rubrieken

Kies een van de nieuwsrubrieken, om artikelen te lezen uit die rubriek. Het nieuwste bericht staat altijd boven aan!

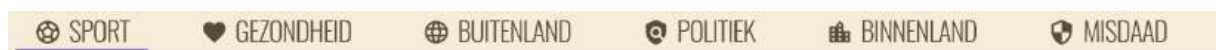


Podcasts

Elke rubriek toont ook podcasts die daarmee te maken hebben! Tap op een podcast om die te beluisteren.

5.3. PODCASTS

Onder vermaak, PODCASTS, vindt u nu ook podcasts!. De populairste podcasts zijn voor u verzameld, scroll er door om de verschillende rubrieken te bekijken, zoals SPORT, MAATSCHAPPIJ, NIEUWS, ECONOMIE, SPIRITUALITEIT, RELIGIE etc.

Kies uw favoriete podcast en klik op het icon. De laatste aflevering van die podcast wordt automatisch gestart.

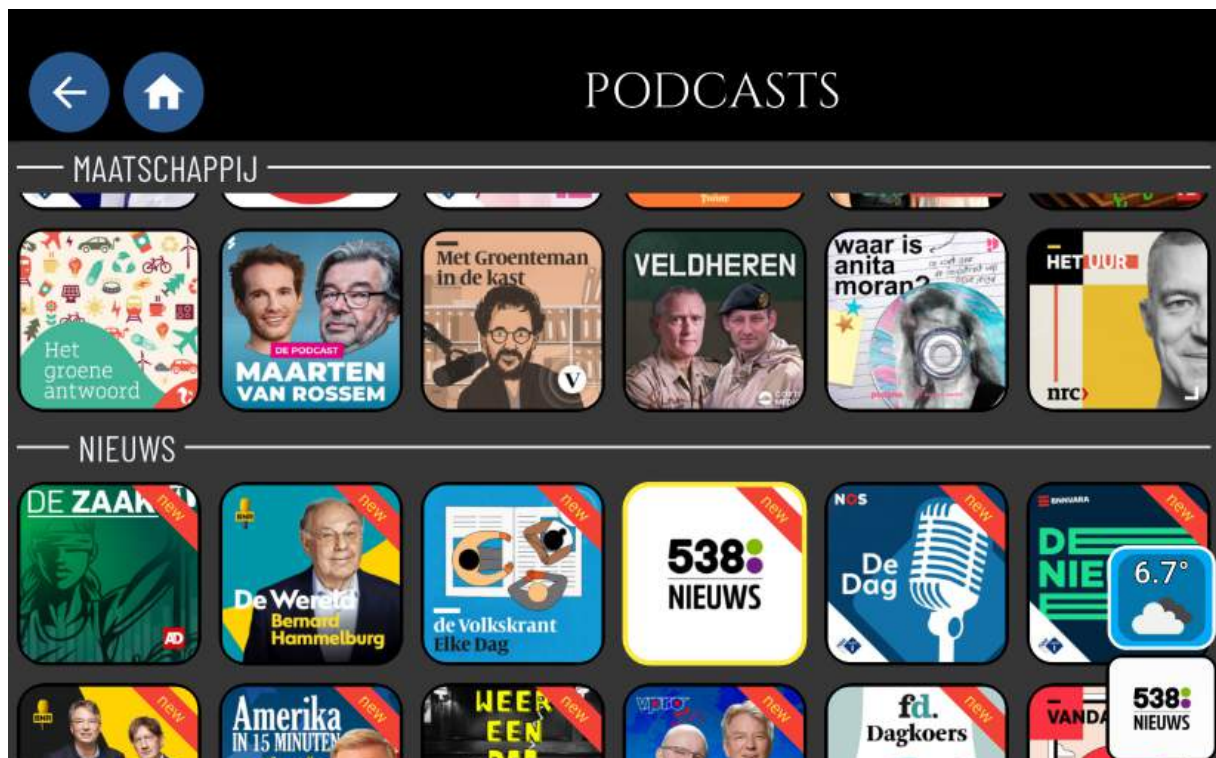

U ziet de podcast icoon rechts onderin verschijnen. Klinkt u op dit icoon dan krijgt u het podcast menu te zien, met informatie over de huidige podcast.



5.4. RADIO

Memory Lane heeft ook een pagina met radio zenders, zowel nationaal als lokaal. Er zijn zelfs zenders uit België!



APPENDIX- ASSISTENT –INTERACTIE

Heeft u een AI abonnement? Dan ziet u rechts onderin de Assistentie knop:



Hier op drukken en u kunt gaan spreken met de AI.



U kunt nu een tekst inspreken. Deze wordt na goedkeuring van u (automatisch) verstuurd. Stel u heeft een tekst ingesproken, dan verschijnt die in het scherm, zodat u weet wat er wordt verstuurd.




	De huidige tekst verzenden Druk op deze knop om het ingesproken bericht te versturen naar de AI. LET OP: Een bericht wordt automatisch verstuurd na 5 seconde stilte.
	Als u wilt afbreken, kies dan de X knop. U verlaat het AI scherm zonder iets te doen.
	Tekst opnieuw inspreken, soms bedenkt u zich of wordt een woord verkeerd begrepen. Dit verwijdert de reeds ingesproken tekst zodat u opnieuw kunt beginnen.

APPENDIX - PODCAST MENU

Als er een podcast afspeelt, ziet u het ICON met de podcast rechtsonderin het scherm.

Tap op dit ICON om een menu op te roepen waarmee u de podcast kunt instellen:

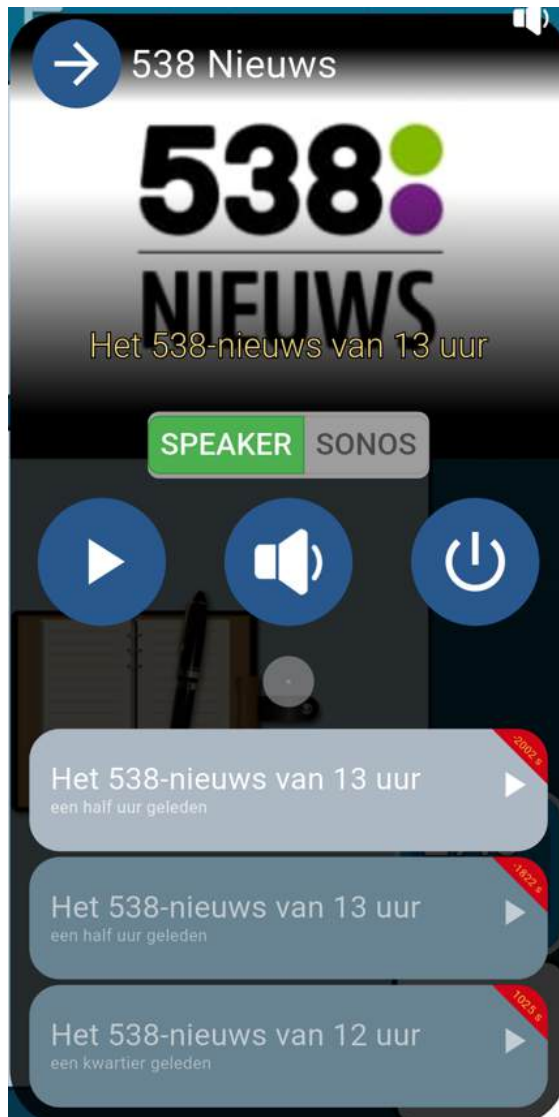

SONOS gebruikers kunnen de podcast op hun SONOS afspelen.

	AFSPELEN van de podcast (Podcasts worden automatisch gestart)
---	--


	VOLUME instellen
	STOP PODCASTS – dit beeindigt het afspelen van deze podcasts en het icon verdwijnt automatisch.
	AFLEVERINGEN kiezen: Klik op een van de afleveringen om die te starten.

APPENDIX - VOLUME

Wilt u het volume veranderen? Rechtsboven in vindt u een volume icon. Hiermee kunt u overall het volume aanpassen. Deze optie moet dan wel aanstaan (zie ook 10.3.1)




U krijgt dan een popup met om het volume in te stellen.

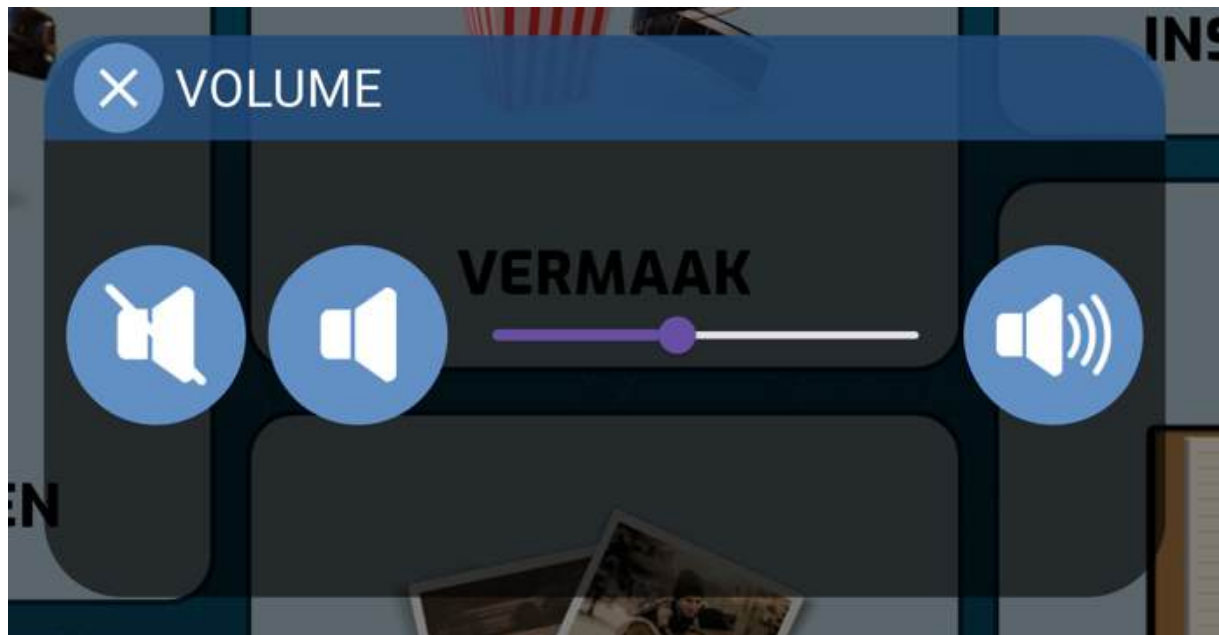

APPENDIX - HUE


U kunt philips HUE bedienen met Memory Lane!

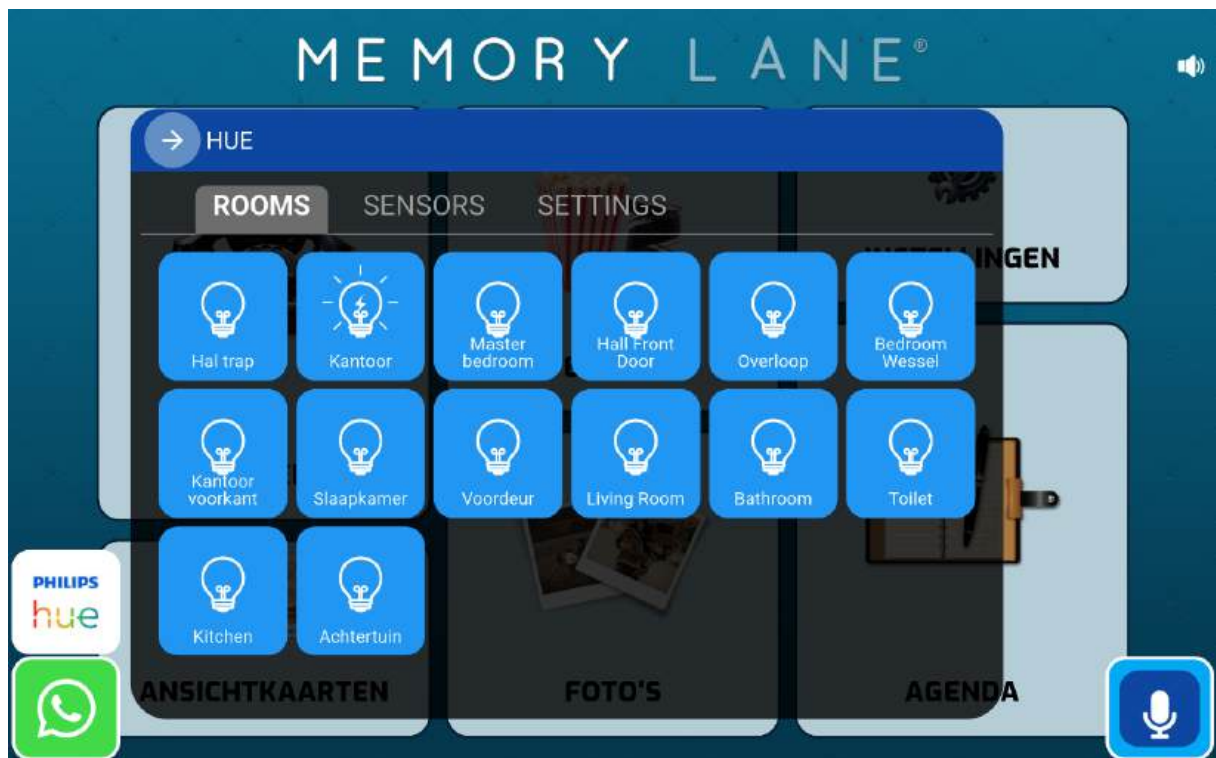

Druk op een kamer om alle lichten aan of uit te zetten. U ziet in één keer alle kamers die een lamp aan of uit hebben.

SENSOREN:



U kunt ook SENSOREN aan sluiten, dan kunt u zien of er beweging is ergens en of het licht is in die kamer. Deze informatie kan worden gebruikt in de motion detection van Memory Lane voor een nauwkeurige analyse.

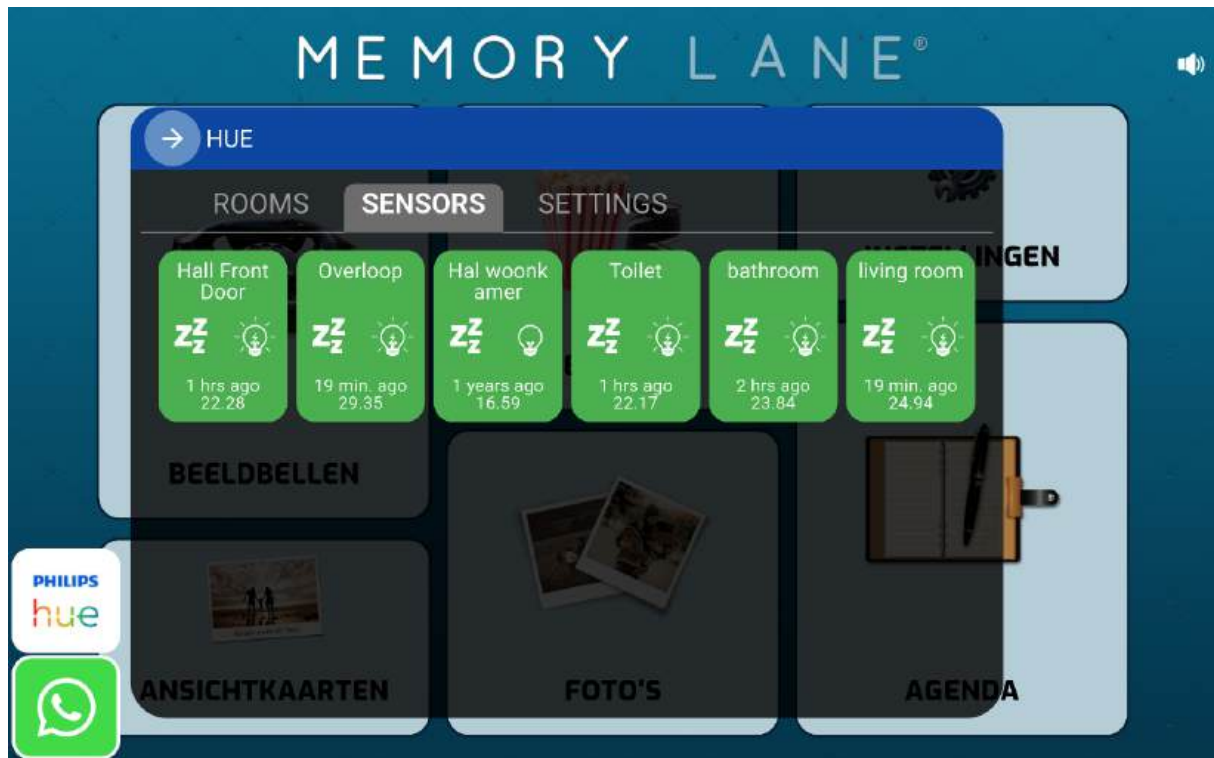

Instellingen van de HUE.



HUE – HUE aan of uit

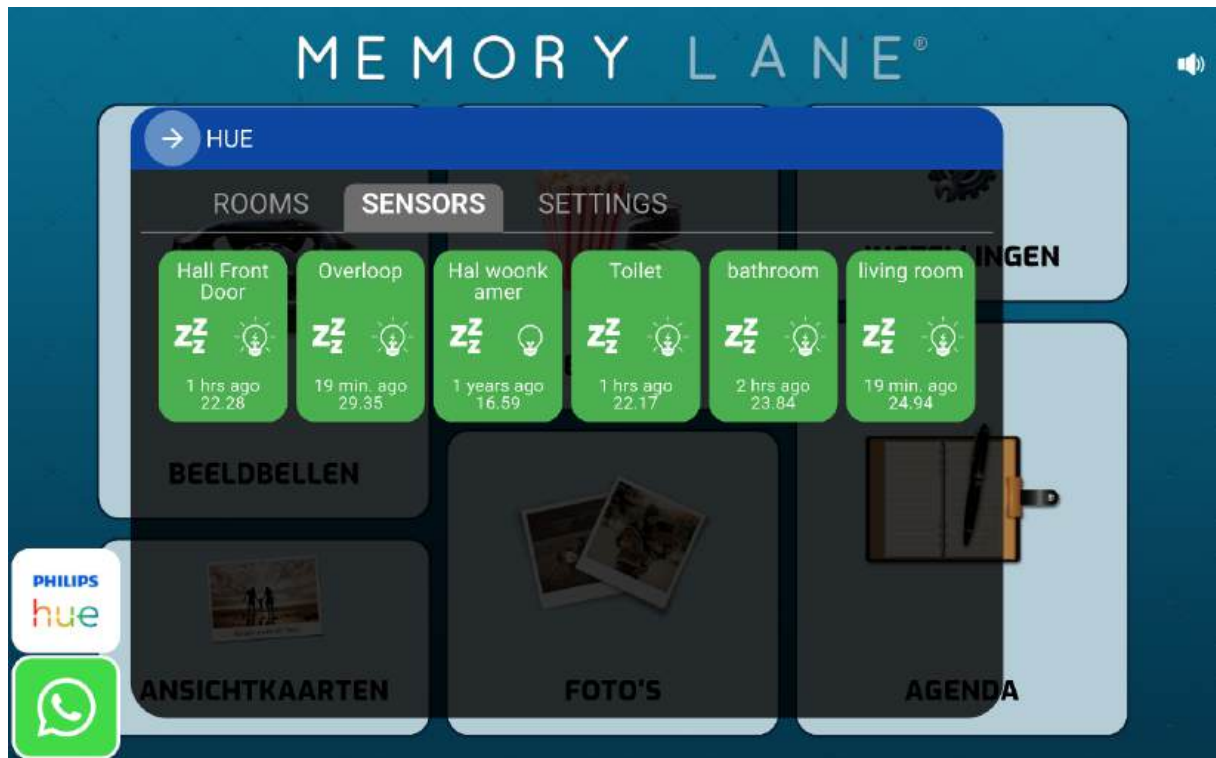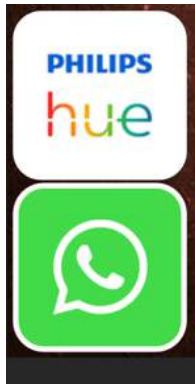

HUE Icon – Of er een icon getoond moet worden zodat het HUE menu opgeroepen kan worden.

APPENDIX - SUPPORT

Hulp nodig? U kunt ons altijd mailen op info@roxelane.nl

Kijk ook op :

[VEELGESTELDE VRAGEN – Memory Lane \(mymemorylane.com\)](http://mymemorylane.com)

We wensen u en uw dierbare heel veel plezier met uw nieuwe memory lane.

Mvrgr
het Memory Lane team